

KANATLILARDAN MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ İÇİN NASIL NUMUNE ALMALI VE GÖNDERMELİYİM

HASTALIK	NUMUNE CİNSİ	NUMUNE KABI	ANALİZ CİNSİ	NUMUNE GÖNDERME KOŞULLARI		
				24 Saat İçerisinde	24 Saat Üzeri	Açıklama
Sindirim sistemi hastalıkları	Sindirim sistemi organları	Vida kapaklı steril numune kabı	Mikrobiyolojik / Moleküler	Soğuk zincir	Dondurulmuş	Dondurma mikrobiyolojik kültürü etkiler
	Kloakal sürüntü	Kuru svap	Moleküler	Oda sıcaklığı	Soğuk zincir	-
		Kuru svap / transport mediumlu svap	Mikrobiyolojik	Oda sıcaklığı	Soğuk zincir	-
	Sekum içeriği (yalnızca Brachyspira paneli için)	Vida kapaklı steril numune kabı	Moleküler	Soğuk zincir	Dondurulmuş	Dondurma mikrobiyolojik kültürü etkiler
Solunum sistemi hastalıkları	Akciğer	Vida kapaklı steril numune kabı	Mikrobiyolojik / Moleküler	Soğuk zincir	Dondurulmuş	Dondurma mikrobiyolojik kültürü etkiler
	Trakea	Vida kapaklı steril numune kabı	Mikrobiyolojik / Moleküler	Soğuk zincir	Dondurulmuş	Dondurma mikrobiyolojik kültürü etkiler
	Trakealı baş (Coryza paneli için)	Vida kapaklı steril numune kabı	Mikrobiyolojik / Moleküler	Soğuk zincir	Dondurulmuş	Dondurma mikrobiyolojik kültürü etkiler
	Trakeal sürüntü	Kuru svap	Moleküler	Oda sıcaklığı	Soğuk zincir	-
	İnfraorbital sinüs sürüntüleri (Coryza paneli için)	Kuru svap	Moleküler	Oda sıcaklığı	Soğuk zincir	-

Notlar:

1. Örnekler canlı veya yeni ölmüş hayvanlardan alınmalıdır.
2. Oda sıcaklığı : (+22 °C)-(+25°C)
3. Soğuk zincir : (+2°C) - (+8 °C)
4. Dondurulmuş : (-10°C)-(-20 °C)

KANATLILARDAN HEMATOLOJİ VE BİYOKİMYA ANALİZLERİ İÇİN NASIL NUMUNE ALMALI VE GÖNDERMELİYİM

PARAMETRE	NUMUNE CİNSİ	NUMUNE KABI	NUMUNE GÖNDERME KOŞULLARI
HEMATOLOJİ			
Hemogram	EDTA'lı Kan	Mor kapaklı tüp	Soğuk zincir
Hemogram+Retikülositler Hemogram, % Retikülosit sayısı, Olgunlaşmamış Retikülosit Sayısı, Retikülosit Sayısı	EDTA'lı Kan	Mor kapaklı tüp	Soğuk zincir
BİYOKİMYA			
Genel biyokimya: Glikoz, GLDH, AST, Protein toplamı, Ürik asit, Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum, Kalsiyum/Fosfor oranı	Serum	Sarı kapaklı tüp	Soğuk zincir/Dondurarak
Mineral Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum, Kalsiyum/Fosfor oranı	Serum	Sarı kapaklı tüp	Soğuk zincir/Dondurarak

Notlar:

1. Soğuk zincir : (+2°C) - (+8 °C)
2. Dondurulmuş : (-10°C)-(-20 °C)